

Opalescence



実は…  
歯の色が気になる

YES NO

裏面へ

# お手軽ホームホワイトニングしてみませんか？

まずは歯科医院にて

STEP

## 1 まずはお口の中をCheck!




歯科医師より使用方法、注意事項の説明を受けます。  
お口全体の健康を確認します。

\*むし歯など治療が必要な場合は、  
治療が完了してからホワイトニングを行って下さい。

STEP

## 2 歯の色をCheck!

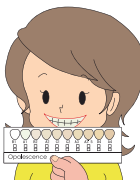

歯の色調診査を行います。

STEP

## 3 ホームホワイトニング材の 処方

ホームホワイトニング材を処方してもらいます。  
その際に、使用方法、使用上の注意など説明を受けます。



少しでも歯のホワイトニングに興味を持ったら  
このバッジを付けたスタッフにお声かけください。

お家で

STEP

## 4 トレイのつけ方



パッケージから製品を取り出します。  
「U」... 上顎用ホワイトニングトレイ  
「L」... 下顎用ホワイトニングトレイ



上顎用トレイを歯面に装着します。



軽く吸い込むようにして、  
トレイを歯面に密着させます。



内側の白いトレイを歯に残したまま、  
外側の色付きのトレイを取り外します。  
下顎用のトレイに対しても同様に装着します。



装着後、ホワイトニングトレイを取り外し、  
破棄します。歯を磨き余分な  
ジェルを除去します。

STEP

## 5 ホワイトニングの実施

好きな時にホワイトニング！  
1日90分トレイをはめるだけ！

\*1日90分、10日間分のホームホワイトニングキットです。  
\*ホワイトニング終了時には、歯科医院に再度来院し、  
医師の診断を受けてください。また再診は歯科医院へご相談ください。



使い方はこちらのビデオも  
合わせてチェック！

ULTRADENT JAPAN 株式会社

本社 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-34-14 初台TNビル3F TEL (03) 5365-1760 FAX (03) 5365-1759  
大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル4F TEL (06) 6151-3251 FAX (06) 6151-3252  
第一種医療機器製造販売業 許可番号:13B1X10086 ©2021 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

0120-060-751 | www.ultradent.jp

202110

ULTRADENT